

## Utilização do RTV




## 4. UTILIZAÇÃO DO RTV (Visualizador em Tempo Real)

### 4.1 Visão Geral

O Recetor MiroCam® apresenta as imagens captadas por uma cápsula através de um visor LCD, em tempo real.

#### ■ Configuração do Ecrã Básico

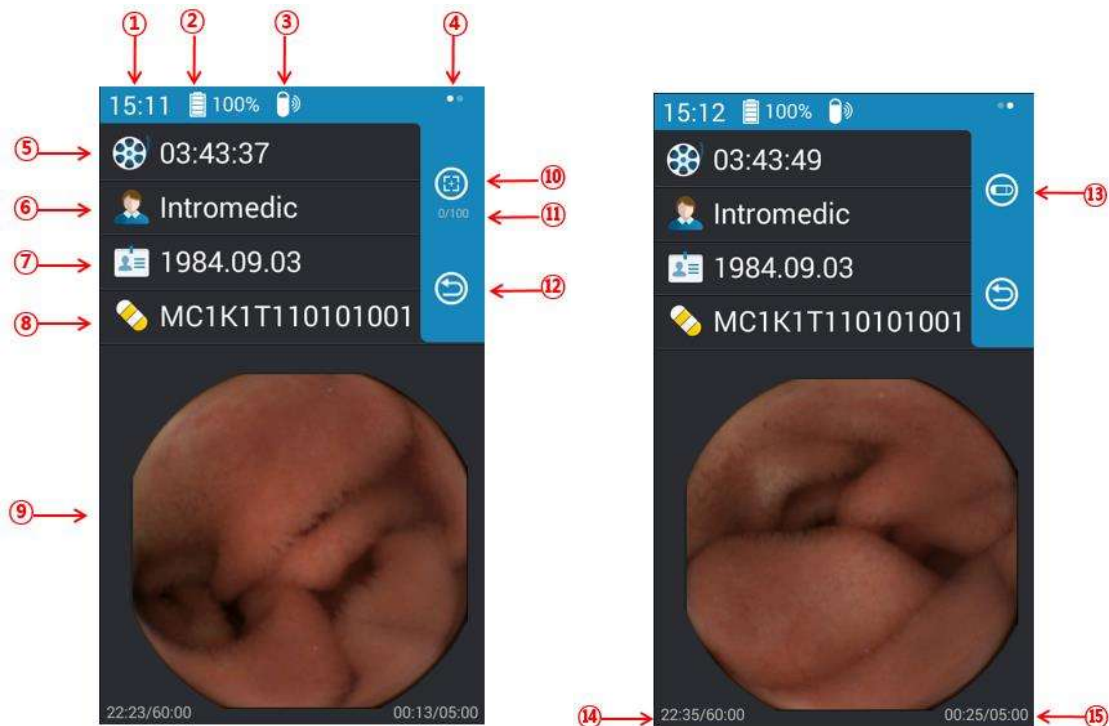

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| ① | Hora Local         | ⑨ | Ecrã Principal   |
| ② | Nível da Bateria   | ⑩ | Captura de imagem/<br>Seleção o Mestre-Escravo/<br>Botão de Volume |
| ③ | Sinal              | ⑪ | O número da imagem<br>capturada                                    |
| ④ | Navegador          | ⑫ | Botão de Ligar o Sistema /<br>LCD                                  |
| ⑤ | Hora da Gravação   | ⑬ | Câmara de Vídeo<br>Selecionada                                     |
| ⑥ | Nome do Doente     | ⑭ | Tempo de operação RTV total  |
| ⑦ | Data de Nascimento | ⑮ | Tempo de reprodução RTV<br>atual                                   |

|   |                            |  |  |
|---|----------------------------|--|--|
| ⑧ | Número de Série da Cápsula |  |  |
|---|----------------------------|--|--|

## 4.2 Utilização do RTV (Visualizador em Tempo Real)

### 4.2.1 Antes de Utilizar o RTV

- O Recetor MiroCam® dispõe de um LCD para apresentar as imagens captadas em tempo real.
- Não utilize o RTV durante um longo período de tempo. A bateria pode ficar fraca.
- Para mais informações, consulte o Manual de Utilização.




**AVISO** Utilize o RTV (Visualizador em Tempo Real) no ecrã LCD para verificar se a Cápsula MiroCam® entrou no duodeno e intestino delgado durante a endoscopia por cápsula. Não diagnostique lesões através de imagens em tempo real.


### 4.2.2 Ligar o LCD e verificar RTV

- Prima o botão ao fundo do recetor MiroCam® ao mesmo tempo que prime o botão do navegador no canto superior direito do Recetor MiroCam® para ligar o LCD.




- Prima o Botão de Volume ao lado de  para ativar o RTV e verificar as imagens capturadas em tempo real.




 **AVISO** O RTV apenas pode ser usado durante um total de 60 minutos durante toda a Endoscopia por Cápsula MiroCam®.


O  é desativado após 60 minutos de RTV.

 **NOTA** O RTV é desligado automaticamente após 5 minutos e o LCD desliga-se.


#### 4.2.3 Captura de Imagem durante visualização em Tempo Real

- Prima o Botão de Volume ao lado  da Imagem capturada.




- O número de imagens capturadas é apresentado por baixo do ícone  limitado a 100.




**AVISO** O ícone  desativado quando o número de imagens capturadas atinge os 100.



**NOTA** O utilizador pode alterar as configurações por defeito, de adicionar ou não imagens ao relatório a partir de **Ferramentas -> Preferências -> Revisão**.

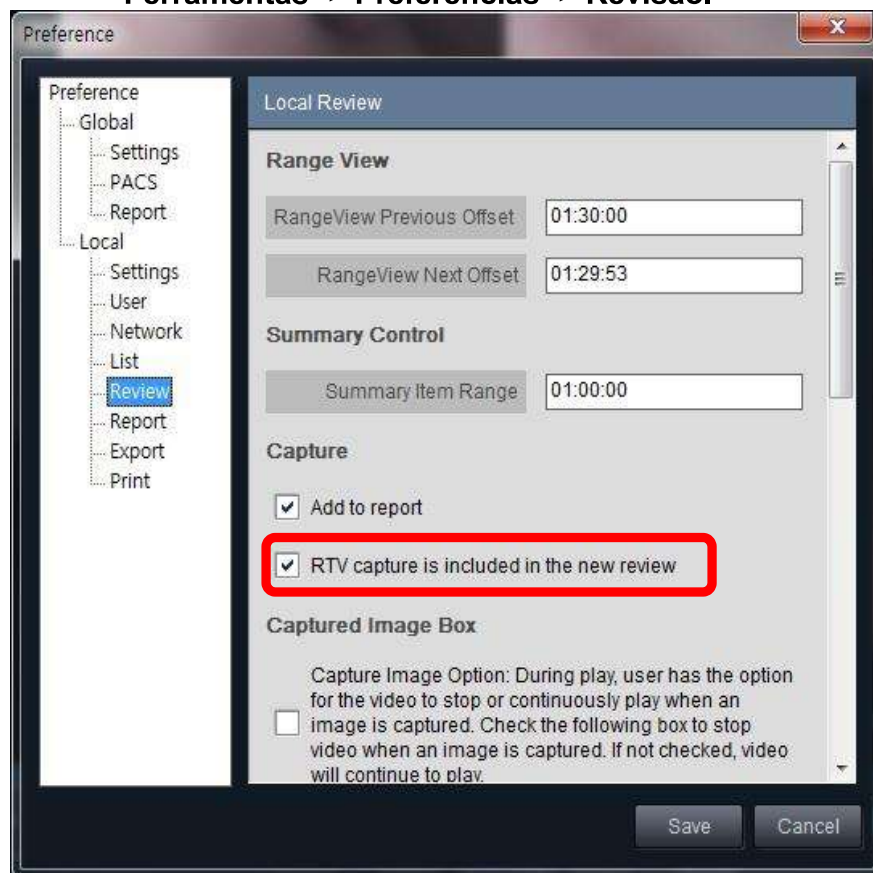


#### 4.2.4 Mude o lado da vista dupla no MC2000 durante a visualização em tempo real

- Prima o Botão de Volume ao lado de  para mudar o lado da vista.



#### 4.2.5 Depois de Utilizar o RTV

- Após verificar as imagens, prima o botão  de ligar à direita no Recetor MiroCam® para terminar o RTV e retomar o modo de gravação.



